

DUHOVKA / duhovková protéza

Pokyny k fotografování a vyhodnocení tisku fotografie

Protože je barevná kompozice duhovkové protézy dělaná na míru zákazníkovi na základě výtisku fotografie, měla by být pořízení a výtisku fotografie duhovky věnována co nejvyšší pozornost, fotografie každého oka (a její zvětšenina) by měla být co nejvyšší kvality.

Prosíme dbejte na následující detaily:

Pacientovo oko osvětlete stejnoměrně, bez stínů na duhovce.

Aby nedošlo k odleskům, použijte světelné zdroje ze dvou různých stran.

Před pořízením fotografie je nutné zkontrolovat bilanci bílé barvy fotoaparátu (postupujte podle návodu k digitálnímu fotoaparátu).


K nastavení použijte místo pacientova oka bílý papír. Prosíme nehýbejte potom se světlem.

Poté umístěte pacienta do stejné polohy a vyfotografujte každé oko.

K fotografování nepoužívejte videokameru.

Použijte tiskárnu určenou k tisku fotografií a speciální fotopapír k vytištění Vašich digitálních fotografií.

Pokud nejste zařízení pro pořízení a vytištění vysoce kvalitní fotografie, doporučujeme poslat pacienta k profesionálnímu fotografovi, který takovou fotografii každého oka pořídí. Dbejte na správnou barevnost vytisknuté fotografie.

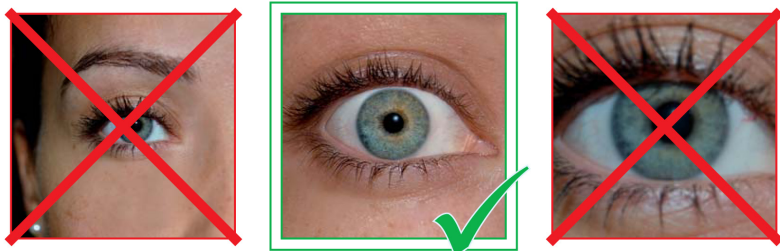

Vyhodnoťte Vaši fotografii (zvětšeninu):

Zkontrolujte barvu spojivky na výtisku.

Pokud není bílá, obrázek má barevnou odchylku.

Porovnejte barvu na fotografii s duhovkou pacienta

(oboje, fotografii a duhovku pod stejným osvětlením).



PROSÍME neposílejte fotografie pouze DIGITÁLNĚ e-mailem, protože se pak nemůžeme ujistit, že vzhled fotografie na našem monitoru je identický s barevnou kompozicí pacientovy vlastní duhovky, a protože nemůžeme ověřit barevnou shodu, pokud si fotografii vytiskneme sami.

PROSÍME nechejte pacienta podepsat objednávkový formulář a odsouhlasit výběr fotografie před tím, než nám poštou zašlete označené fotografie a správně vyplněný objednávkový formulář na adresu:

MEDICAL VISION s.r.o.

Staňkova 39, 612 00, Brno, Česká republika