


Šití

jehly a šicí materiál na BLEFAROTOMIE, BLEFAROPLASTIKY, CHALAZION, SPADLÉ VÍČKO a další zákroky na víčkách a očním okolí



podrobné informace o technikách šití v samostatném manuálu Mani

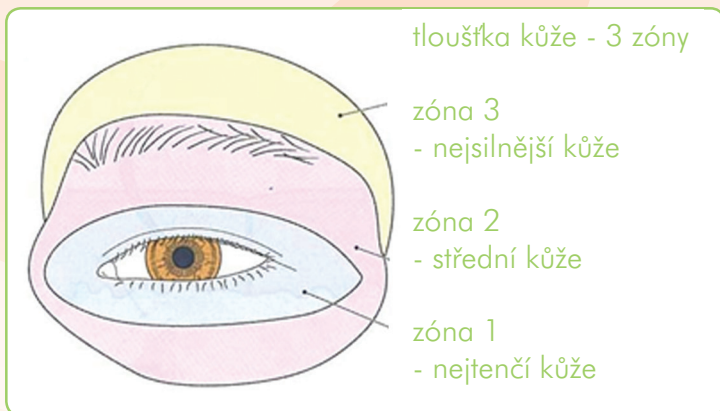

Zóna 1

kůže je tenká a blízko okraje očního víčka, kde jsou svaly velmi aktivní; je tedy nepravděpodobné smrštění jizvy
doporučujeme nylonovou nit 7-0

Zóna 2


kůže je silná; jeden steh drží obě vrstvy kůže - epidermis i dermis;
doporučujeme nit 6-0

Zóna 3

pokud je kůže příliš silná na to, aby ji držel jeden steh, je potřeba steh, který půjde až pod dermis do podkožní tkáně;
doporučujeme nylonovou nit 5-0

spadlé víčko

oblast	ref.č.	USP	popis	délka	jehla	délka jehly	oblouk	průměr
kůže (oční víčko)	3364 S	7-0 (0,5)	nylon, black, mono	50 cm	„lancet“	11,0 mm	39880	0,33 mm
kůže (oční víčko)	3361	7-0 (0,5)	nylon, black, mono	30 cm	„trape spatula“	8,0 mm	39880	
oční víčko se záhybem	3365	7-0 (0,5)	nylon, black, mono	30 cm	„cut traper“	15,0 mm	39880	
kůže / sval	2808	6-0 (0,5)	nylon, black, mono	30 cm	„reverse cut“	13,0 mm	39880	0,28 mm
kůže / sval	3382 S	6-0 (0,5)	nylon, black, mono	45 cm	„lancet“	11,0 mm	3/8	0,33 mm
kůže / sval	2859	6-0 (0,5)	nylon, black, mono	45 cm	„trape spatula“	8,0 mm	7/16	0,28 mm

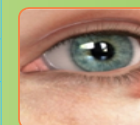

chalazion: zóna 1

ref.č.	USP	popis	délka	jehla	délka jehly	oblouk	průměr
3361	7-0 (0,5)	nylon, black mono	30 cm	„trape spatula“	8,0 mm	3/8	0,33 mm
2090	8-0 (0,4)	PGA (polyglyk. kyselina)	30 cm	„trape spatula“	6,5 mm	3/8	0,20 mm

